

ErgoNatural®

NUEVA

MASCARILLA INFANTIL



DE
3-14
AÑOS

"POR LA SEGURIDAD DE TODOS"

REUTILIZABLE

DE ALTA FILTRACIÓN

DOBLE HOMOLOGACIÓN

HIGIÉNICA
UNE 0065:2020

QUIRÚRGICA
IIR STANDARD
UNE-EN 14683



- ✓ REUTILIZABLE
- ✓ RECORTABLE Y AJUSTABLE
- ✓ ANTI-SALPICADURAS
- ✓ TRIPLE CAPA + FILTRO INTERNO



DISEÑADA,
DESARROLLADA Y
FABRICADA EN ESPAÑA



REGISTRO
SANITARIO
6912-PS



LAVABLE Y
DESINFECTABLE

ErgoNatural®




POLIPROPILENO 100% TNT

POLIÉSTER 100%

POLIPROPILENO 100% TNT

X3 TRIPLE CAPA

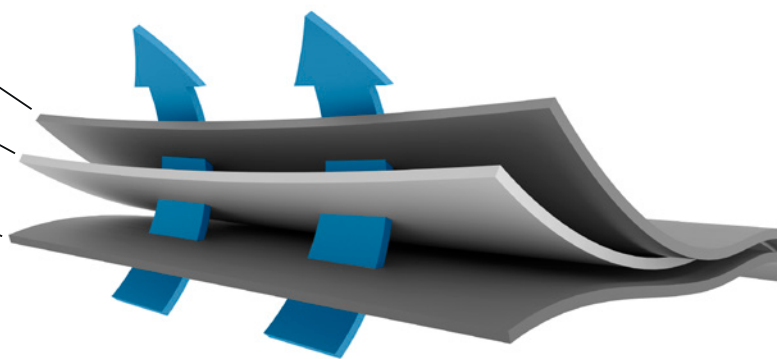

**MÁXIMA
FILTRACIÓN
+
ÓPTIMA
RESPIRABILIDAD**



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y USO

1



Lávate muy bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o bien utiliza una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

2



Coge la mascarilla por las tiras elásticas y colócala sobre la cara, pasando las tiras por detrás de las orejas.

3



Asegúrate que la mascarilla cubre completamente la nariz y la boca.

4



No te quites la mascarilla para hablar, toser ni estornudar. No la toques con los dedos.

5



Para retirar la mascarilla después de su uso, hazlo siempre por las tiras elásticas.

6



Lavar diariamente después de cada uso, siguiendo las indicaciones y desechar cuando exista una necesidad adicional de protección.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y DESINFECCIÓN



Lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura 60° (ciclo normal de lavadora)



Utilizar cualquiera de los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad y que han pasado la Norma 14476 de actividad virucida que se indican en dicho documento.

*La duración de esta mascarilla dependerá del uso y cuidado de cada usuario

REQUISITOS SOBRE LOS DISTINTOS TIPOS DE MASCARILLAS

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE UN SOLO USO

Directiva 93/42/CEE. Norma EN 14683:2019 + AC:2019

Ensayos basados en la norma
EN 14683:2019+AC: 2019

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

	TIPO I	TIPO II	TIPO IIR
EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) %	≥95	≥98	≥98
RESPIRABILIDAD: PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm²)	<40	<40	<60
PRESIÓN DE RESISTENCIA A SALPICADURAS (kPa)	No Requerido	No Requerido	≥16,0

MASCARILLAS HIGIÉNICAS NO REUTILIZABLES

Especificaciones Técnicas
UNE 0064-1

Ensayos basados en la norma
EN 14683:2019+AC: 2019

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) %	≥95
RESPIRABILIDAD: PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm²)	<60

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES

Especificaciones Técnicas
UNE 0064-1

Ensayos basados en la norma
EN 14683:2019+AC: 2019

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) %	≥90
RESPIRABILIDAD: PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm²)	<60

RESUMEN RESULTADOS TESTS

(Promedio ± DS)

Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC: 2019	QUIRÚRGICA	HIGIÉNICA TRAS LOS LAVADOS	VALORES MASCARILLA ErgoNatural®
EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) %	98,88 ± 0,93	95,5	
RESPIRABILIDAD: PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm²)	36 ± 1	37	
PRESIÓN DE RESISTENCIA A SALPICADURAS (kPa)	Fallan 0 de 32 a 17 kPa		

Ensayos realizados por:



aitex
textile research institute

eurofins



HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES



MARCADO CE

POR: AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS



REGISTRO SANITARIO 6912-PS

POR: AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS



HOMOLOGACIONES MASCARILLA

POR: AITEX TEXTIL RESEARCH INSTITUTE

HIGIÉNICA
0065:2020

QUIRÚRGICA
IIR STANDARD
EN 14683



PARA LA OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS ORIGINALES, SOLICITAR A:
administración@scrfoot.com

CON LA COLABORACIÓN DE

